



Istruzioni per la manutenzione di pinze e strumenti

Queste istruzioni sono valide per tutte le pinze, gli strumenti e gli strumenti rotanti Dentaurum utilizzabili sul paziente.


Queste istruzioni sono conformi alle disposizioni previste dalla direttiva DIN EN ISO 17664:2004 e alle linee guida per l'igiene ospedaliera e la prevenzione delle infezioni.

Indicazioni generali

Prima del loro uso, ogni strumento o pinza deve essere pulita, disinfettata ed eventualmente sterilizzata. Ciò vale anche per il loro primo utilizzo dopo l'acquisto in quanto, generalmente, le pinze e gli strumenti vengono forniti non sterili (pulitura e disinfezione dopo il prelievo dalla confezione, sterilizzazione dopo l'imbustamento). L'efficace pulitura e disinfezione è condizione irrinunciabile perché la successiva sterilizzazione possa essere efficiente. Questa regola riguarda anche gli strumenti rotanti (frese), in seguito indicati con il termine generico di strumenti.

Si consiglia di tenere sempre ben separati gli strumenti sporchi da quelli puliti, evitando di riporli sul vassoio per non contaminarlo. Pulire e disinfettare gli strumenti sporchi, quindi riassortire il vassoio e passare alla sterilizzazione conclusiva del tutto.

Pulitura manuale

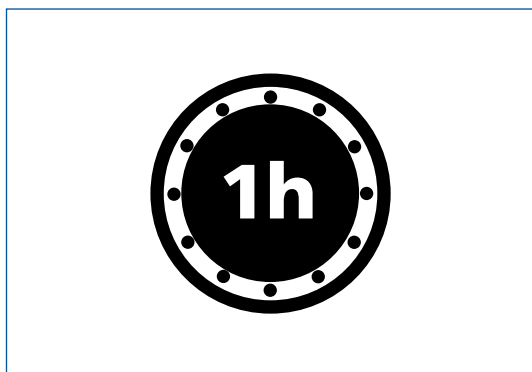


Subito dopo l'uso o al massimo entro un'ora dall'utilizzo, è necessario asportare il grosso dello sporco presente su pinze e strumenti.

Sciacquare le pinze e gli strumenti sotto acqua corrente e metterli a bagnomaria in una soluzione disinfettante.

Per la pulitura manuale, utilizzare solo spazzole morbide (con setole di nylon) oppure un panno morbido pulito.

Non impiegare spazzole o pagliette metalliche.

La soluzione disinfettante deve essere priva di aldeide (altri-menti fissante di tracce di sangue), offrire una comprovata efficacia (ad es. quelle consigliate da organizzazioni tipo DGHM - Società Tedesca di Igiene e Microbiologia - o da FDA e che abbiano il marchio CE), adatta per la disinfezione di strumenti e con questi compatibile.

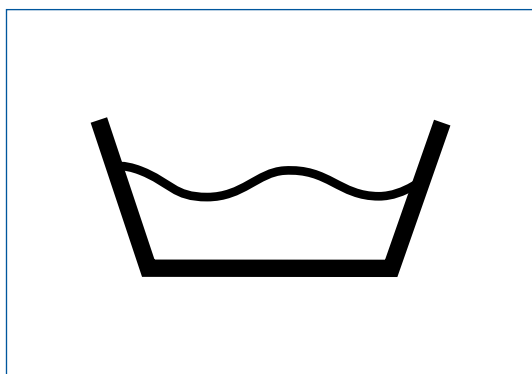


Per l'utilizzo dei termodisinfettori è necessario verificare i seguenti punti:



- che l'apparecchio offra nella sostanza una comprovata efficacia (ad es. quelli consigliati da organizzazioni tipo DGHM - Società Tedesca di Igiene e Microbiologia - o da FDA e che abbiano il marchio CE in conformità con la normativa DIN EN ISO 15883)
- che preveda all'occorrenza un provato ciclo di disinfezione termica (almeno 10 min. a 93 °C o valore $A_0 > 3000$; con la disinfezione chimica c'è il rischio della presenza di residui della soluzione disinfettante sullo strumento)
- che per il risciacquo venga impiegata solo acqua sterile o povera di germi (max. 10/ml) nonché povera di endotossine (max. 0,25/ml) (ad es. purified water/highly purified water)
- che l'aria di asciugatura sia filtrata

Per la scelta della soluzione detergente da utilizzare è necessario osservare i seguenti punti:

- che sia adatta alla pulitura di strumenti in metallo e plastica
- che, nel caso in cui non segua la disinfezione termica, venga utilizzata in aggiunta un'appropriata soluzione disinfettante di comprovata efficacia (ad es. quelle consigliate da organizzazioni tipo DGHM - Società Tedesca di Igiene e Microbiologia - o da FDA e che abbiano il marchio CE) e che questa sia compatibile con il detergente utilizzato
- che le sostanze chimiche presenti siano compatibili con gli strumenti (vedi § „Resistenza del materiale“)

Si consiglia di utilizzare le concentrazioni dichiarate dal produttore del detergente e del disinfettante impiegato.

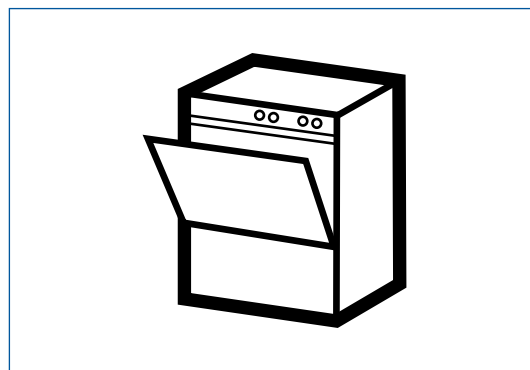

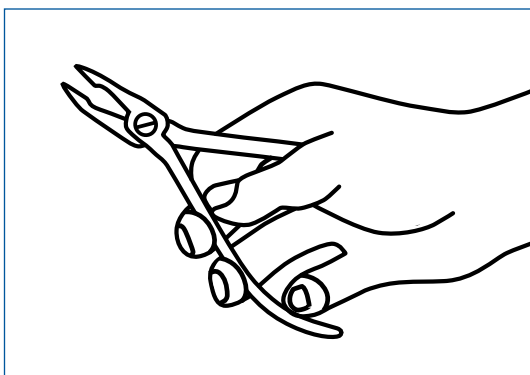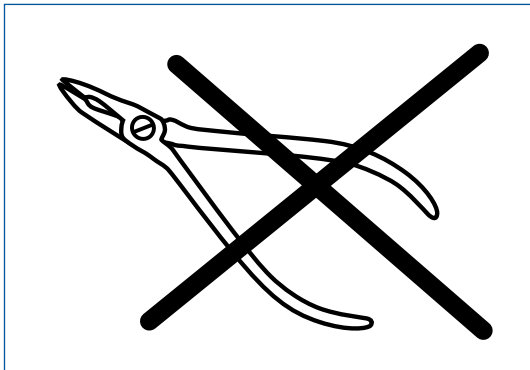

Protocollo di lavoro

- 1 Smontare il più possibile le pinze e gli strumenti.
- 2 Inserire nel termodisinfettore le pinze e gli strumenti smontati o semiaperti, evitando che vi sia contatto tra loro.
- 3 Avviare il programma.
- 4 Al termine del programma, prelevare le pinze e gli strumenti dal termodisinfettore.
- 5 Controllare e imbustare gli strumenti possibilmente subito dopo il prelievo dal termodisinfettore.
- 6 **Se l'apparecchio non possiede un programma automatico di asciugatura, si dovrebbe mantenere leggermente aperto il suo sportello.**

Prove riguardanti l'efficienza della pulitura e disinfezione meccanica sono state condotte da un laboratorio di analisi accreditato e indipendente con l'ausilio del termodisinfettore G 7836 GD (Miele & Cie. GmbH & Co., Gütersloh) e della soluzione detergente neodisher® Medizym (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Amburgo), seguendo il sopra descritto protocollo di lavoro.

Pulitura e disinfezione manuale

Per la scelta della soluzione detergente e disinfettante da usare è necessario osservare i seguenti punti:

- le pinze e gli strumenti in metallo e/o plastica devono essere adatti alla pulitura e alla disinfezione,
- la soluzione detergente deve essere adatta alla pulitura a ultrasuoni,
- utilizzare solamente soluzioni disinfettanti di comprovata efficacia (ad es. quelle consigliate da organizzazioni tipo DGHM - Società Tedesca di Igiene e Microbiologia - o da FDA e che abbiano il marchio CE). Queste devono essere compatibili con la soluzione detergente.

Se possibile evitare l'uso di soluzioni combinate di pulitura e disinfezione. Queste possono essere utilizzate solo in caso di scarsa contaminazione (nessuna sporcizia evidente all'osservazione).

Utilizzare assolutamente le concentrazioni e i tempi consigliati dal produttore del detergente e del disinfettante impiegati. Utilizzare, inoltre, sempre e solo soluzioni preparate al momento e solo acqua sterile o povera di germi (max. 10/ml) nonché povera di endotossine (max. 0,25/ml) (ad es. purified water/highly purified water) e per asciugare solamente aria filtrata.


Protocollo di pulitura

- 1 Smontare il più possibile le pinze e gli strumenti
- 2 Inserire le pinze e gli strumenti smontati o semiaperti nel bagno di pulitura, evitando che vi sia contatto tra loro. Lasciare gli oggetti nella soluzione per il tempo necessario, verificando che siano completamente immersi nel liquido. Prima e dopo il tempo di reazione del bagno, tutte le concavità degli strumenti devono essere risciacquate con un getto monouso (quantità minima 5 ml). Eventualmente possono essere utilizzati dispositivi di ritenzione speciali, come ad es. portafrese.
- 3 Prelevare le pinze e gli strumenti dalla soluzione detergente e risciacquarli sotto acqua corrente.
- 4 **Controllare se le pinze e gli strumenti sono sufficientemente puliti.**

Protocollo di disinfezione

- 1 Inserire le pinze e gli strumenti smontati nel bagno di disinfezione. Verificare che siano completamente immersi nel liquido e che non siano a contatto tra loro. Prima e dopo il tempo di reazione del bagno, tutte le concavità degli strumenti devono essere risciacquate con un getto monouso (quantità minima 5 ml).
- 2 Prelevare le pinze e gli strumenti dalla soluzione disinfettante e sciacquarli almeno tre volte.
- 3 Imbustare le pinze e gli strumenti completamente asciutti.


Prove riguardanti l'efficienza della pulitura e la disinfezione manuale sono state condotte da un laboratorio di analisi accreditato e indipendente con l'utilizzo di detergente Boderex® forte e di disinfettante Korsolex® plus (Bode Chemie, Amburgo, Germania), seguendo il sopra descritto protocollo di lavoro.

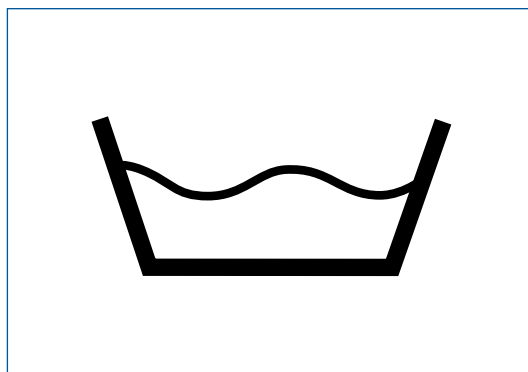

Verifica

Dopo la pulitura ovvero la pulitura/disinfezione, controllare se le pinze e gli strumenti presentano tracce di corrosione, superfici danneggiate, sbeccature e sporcizia, scartando quelli rovinati. Pinze e strumenti ancora sporchi devono essere sottoposti nuovamente a un ciclo di pulitura e disinfezione.


Manutenzione di pinze e strumenti

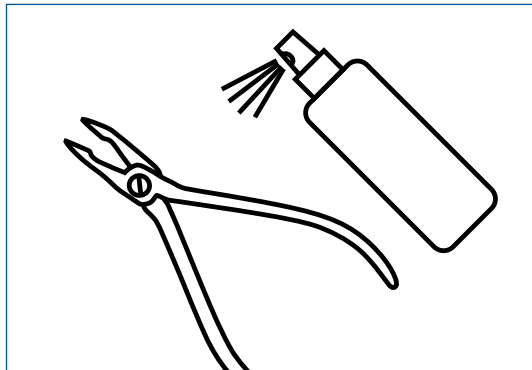

Non utilizzare possibilmente normali oli per strumenti. Tuttavia, qualora lo si desiderasse, utilizzare esclusivamente oli lubrificanti chiari per uso medico verificandone l' idoneità alla sterilizzazione a vapore in considerazione delle temperature che si intendono raggiungere e accertandosi che possiedano una comprovata biocompatibilità.

I terminali delle pinze, le ganasce, le superfici di scorrimento per molle e altre posizioni critiche delle pinze devono essere trattate con olio chiaro per uso medico permeabile al vapore e termoresistente dopo l'asciugatura e prima della sterilizzazione. La protezione con tale olio degli inserti in tungsteno riduce il rischio di corrosione. Si consiglia l'uso dell'olio chiaro di protezione per pinze e strumenti (REF 055-201-00).

Imbustamento

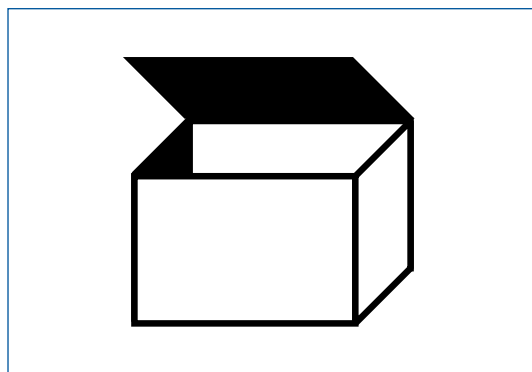


Confezionare le pinze e gli strumenti nonché i vassoi di sterilizzazione in specifiche buste (imbustamento singolo o doppio) e/o contenitori di sterilizzazione, in modo conforme alle seguenti prescrizioni:

- secondo DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607-1/2 (precedentemente: DIN EN 868 / ANSI AAMI ISO 11607)
- in modo adatto alla sterilizzazione a vapore (termoresistente almeno fino a 134 °C e con sufficiente permeabilità al vapore)
- in confezioni che diano sufficienti garanzie di protezione alle pinze e strumenti da possibili danneggiamenti meccanici
- assicurando la regolare manutenzione secondo le indicazioni rilasciate dal produttore (contenitori di sterilizzazione)

Per la sterilizzazione devono essere impiegati solamente i metodi di seguito descritti. Altri sistemi di sterilizzazione non sono indicati. Il sistema di sterilizzazione flash non è generalmente ammesso. Non utilizzare, inoltre, sistemi di sterilizzazione ad aria calda, per irradiazione, con formaldeide o ossido di etilene nonché sterilizzazioni al plasma.

Sterilizzazione a vapore


- metodica a vapore frazionato o gravitazionale*¹ (con sufficiente asciugatura degli oggetti)
- sterilizzatrici conformi alla normativa DIN EN 13060-2004 ovvero DIN EN 285
- conforme alla normativa DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 17665 (precedentemente: DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 11134) validata (commissionamento valido e specifica valutazione di prestazione)
- temperatura max. di sterilizzazione 134°C; (tolleranza conforme alla normativa DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 17665 (precedentemente: DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 11134))
- tempo di sterilizzazione (tempo di esposizione alla temperatura di sterilizzazione) almeno 5 minuti a 134°C

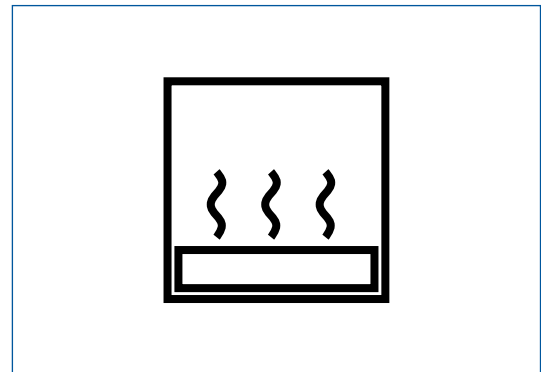

Prove riguardanti l'efficienza della sterilizzazione a vapore sono state condotte da un laboratorio di analisi accreditato e indipendente con l'ausilio della sterilizzatrice a vapore a vuoto frazionato EuroSelectomat (MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH, Planegg) nonché con l'ausilio della sterilizzatrice a vapore gravitazionale Systec V-150 della ditta Systec GmbH Labor-Systemtechnik (Wettenberg), secondo il sopra descritto protocollo di lavoro.

*¹ L'impiego di un metodo meno efficiente come quello gravitazionale è ammissibile solo in caso di indisponibilità del metodo a vuoto frazionato.

Stoccaggio

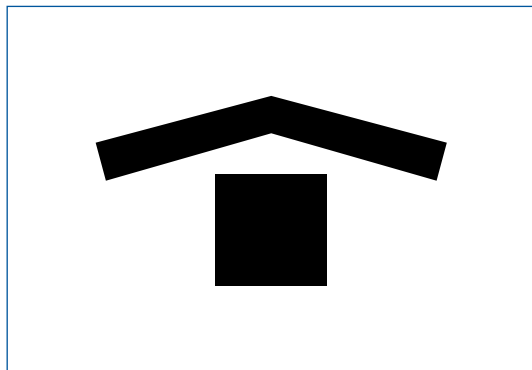

Dopo la sterilizzazione, le pinze e gli strumenti devono essere conservati imbustati in luogo asciutto e privo di polvere.

Resistenza dei materiali

Nella scelta delle soluzioni detergenti e disinfettanti è necessario verificare che il prodotto prescelto non contenga:

- acidi organici, minerali e ossidanti (massimo valore pH 9,5, si consiglia detergenti neutri/enzimatici)
- soluzioni alcaline aggressive
- solventi organici (ad es. alcoli, eteri, chetoni, benzeni)
- sostanze ossidanti (ad es. perossido di idrogeno)
- alogeni (cloro, iodio, bromo)
- idrocarburi aromatici/alogenati
- sali di metalli pesanti

Pinze e strumenti, contenitori di sterilizzazione e tomas®-tray non devono essere puliti con spazzole o pagliette metalliche. Si consiglia, inoltre, di non sottoporre gli stessi a temperature superiori a 134 °C!

Riutilizzo

Tutti gli strumenti rotanti possono essere riutilizzati fino a 5 volte. La responsabilità di ogni ulteriore impiego nonché l'uso di strumenti rotanti danneggiati e/o sporchi resta a carico dell'utilizzatore.

Particolari indicazioni per pinze e strumenti Dentaurem



















Pinze:









- trattare lo strumento solo in posizione semiaperta (aprendolo e chiudendolo più volte)
- pulire
- disinfettare
- i terminali delle pinze, le ganasce, le superfici di scorrimento per molle e altre posizioni critiche delle pinze devono essere trattate con olio chiaro per uso medico (REF 055-201-00), prima di imbustare e sterilizzare























Indicazione: l'olio di protezione riduce il rischio di corrosione degli inserti in tungsteno delle pinze.























Panoramica **pinze e strumenti**




















Nella seguente tabella vengono evidenziate tutte le pinze e gli strumenti che trovano impiego sul paziente. Se non sono descritte indicazioni diverse, devono essere seguite le già esposte istruzioni di manutenzione. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alle specifiche modalità d'uso, vedi www.dentaurum.com, agli opuscoli e al catalogo generale di ortodonzia.








	Descrizione	REF
	Pinza di Nance per anse	000-001-00
	Porta-aggi media sec. Matthieu Pulirla e disinfettarla aperta, sterilizzarla chiusa al primo gradino	000-030-00
	Porta-aggi piccola Pulirla e disinfettarla aperta, sterilizzarla chiusa al primo gradino	000-031-00
	Porta-aggi media con anella sec. Bachmann (per legature in filo metallico) Pulirla e disinfettarla aperta, sterilizzarla chiusa al primo gradino	000-035-00
	Pinza Mosquito senza gancio (per legature elastiche) Pulirla e disinfettarla aperta, sterilizzarla chiusa al primo gradino	000-730-00
	Pinza Mosquito con gancio (per legature elastiche) Pulirla e disinfettarla aperta, sterilizzarla chiusa al primo gradino	000-731-00
	Pinza Mosquito magic®, curva Pulirla e disinfettarla aperta, sterilizzarla chiusa al primo gradino	000-732-00
	Pinza di Nance	001-002-00
	Pinza magic® per archi linguali	003-001-00
	Spingibande con superficie in stagno Non utilizzare detergenti acidi/alcasini	003-006-00
	Pinza di How, curva	003-111-00
	Pinza How, diritta	003-112-00
	Pinza Johnson per contornare	003-114-00
	Pinza universale Weingart	003-120-00
	Pinza universale Weingart piccola	003-121-00
	Pinza Jarabak Light Wire	003-125-00
	Pinza Light Wire	003-130-00
	Pinza di Angle standard	003-139-00

	Descrizione	REF
	Pinza per T.E.O.	003-180-01
	Pinza per archi linguali/palatali	003-185-00
	Pinza a tre becchi Aderer extra piccola	003-205-00
	Asporta-bracket Rimuovere l'inserto prima della pulitura e disinfezione	003-349-00
	Pinza concavo-covessa extra piccola	003-350-00
	Pinza concavo-covessa piccola	003-351-00
	Pinza a testa di martello	003-355-00
	Pinza Angle/Tweed a punte piatte	003-442-00
	Tronchese distale grande	003-700-00
	Tronchese distale piccolo	003-701-00
	Tronchese distale piccolo, manici lunghi	003-702-00
	Tronchese distale, linguale	003-703-00
	Flush cutter piccolo Rimuovere l'o-ring in silicone prima della pulitura, disinfezione e sterilizzazione	003-705-00
	Flush cutter grande Rimuovere l'o-ring in silicone prima della pulitura, disinfezione e sterilizzazione	003-706-00
	Pinza per cerniera di Herbst® TS	003-710-00
	Pinza di ritegno	003-711-00
	Pinza speciale x Ortho-Cast M-Series Per la pulitura e la disinfezione smontare le lame, sterilizzare la pinza montata	003-805-00
	Pinza De La Rosa	004-109-00
	Pinza Begg Light Wire	004-130-00
	Pinza di Angle	004-139-00
	Tronchese grande	004-266-00
	Pinza asporta-bracket, diritta	004-346-00

	Descrizione	REF
	Pinza asporta-bracket, angolata	004-347-00
	Pinza asporta-bracket Rimuovere l'inserto prima della pulitura e disinfezione	004-349-00
	Pinza asporta-bracket speciale, angolata a 45°	004-350-00
	Pinza di Tweed per loop	012-350-00
	Pinza di Tweed per loop Rimuovere l'inserto prima della pulitura e disinfezione	012-351-00
	Tronchesino per legature piccolo	014-151-00
	Tronchesino per legature a 45°	014-152-00
	Tronchesino per legature, linguale	014-153-00
	Tronchesino per legature	014-154-00
	Pinza a due becchi	015-157-00
	Pinza forma-legature	015-158-00
	Pinza tendi-elastici	015-160-00
	Tronchesino per legature medio	016-153-00
	Stripper interdentale Pulire, disinfettare e sterilizzare senza strisce abrasive	018-000-00
	Strumento sec. Langer, a doppia punta	019-000-00
	discovery® pearl Debonding Instrument	019-001-00
	Strumento per legature, a doppia punta	021-273-00
	Strumento per legature e adattatore	022-274-00
	Strumento LinguBall	023-275-00
	Strumento sl	023-276-00
	Strumento sl	023-277-00
	Strumento di posizionamento, linguale	023-278-00

	Descrizione	REF
	Specchietto con manico e linee di riferimento, linguale	023-279-00
	Specchietto senza manico, linguale	023-279-10
	Ligator Smontarlo completamente prima della pulitura e della disinfezione; togliere il filo dalla guida	023-280-00
	Spingibande sec. Mershon	024-300-00
	Pinzette Dopo il trattamento, asciugare bene la fessura della connessione (ad es. con aria compressa).	025-276-00
	Pinzette Dopo il trattamento, asciugare bene la fessura della connessione (ad es. con aria compressa).	025-277-00
	Pinzette angolate Dopo il trattamento, asciugare bene la fessura della connessione (ad es. con aria compressa).	025-279-00
	Pinzette Dopo il trattamento, asciugare bene la fessura della connessione (ad es. con aria compressa)	025-280-00
	Pinza asporta-bande Oliver-Jones Rimuovere l'inserto prima della pulitura e disinfezione	026-347-00
	Spingibande Non utilizzare detergenti e disinfettanti contenenti solventi. Pulire e disinfettare con la testa smontata	026-354-00
	Spingibande in plastica Non utilizzare disinfettanti contenenti solventi	026-355-00
	Strumento di utilità, a punta doppia	027-349-00
	Altimetro a stella per bracket	030-390-00
	Regolo ortodontico sec. Bernklau	044-730-01
	Righello modello Monaco	044-731-00
	Pinza Angle / Tweed	045-000-00
	Pinza di Tweed per loop	045-001-00
	Pinza di Angle	045-002-00
	Pinza universale Weingart	045-003-00
	Pinza asporta-bande Oliver-Jones	045-004-00
	Pinza asporta-bracket	045-005-00
	Pinza di How, diritta	045-006-00

	Descrizione	REF
	Pinza Jarabak Light Wire	045-009-00
	Pinza di Nance per anse	045-010-00
	Tronchese distale	045-021-00
	Tronchesino per legature medio	045-022-00
	Apribocca, versione grande Ritattamento: max. 50 volte. Pulitura/disinfezione: utilizzare solo sostanze detergenti/disinfettanti idonee per policarbonati secondo le istruzioni de fabbricante. Sterilizzazione: a vapore, 121 °C, tempo di mantenimento 15 min.	075-600-00
	Apribocca, versione piccola Ritattamento: max. 50 volte. Pulitura/disinfezione: utilizzare solo sostanze detergenti/disinfettanti idonee per policarbonati secondo le istruzioni de fabbricante. Sterilizzazione: a vapore, 121 °C, tempo di mantenimento 15 min.	075-601-00
	tomas®-screw driver Pulirlo e disinfettarlo completamente smontato. Sterilizzarlo rimontato	302-004-10
	tomas®-applicator	302-004-20
	tomas®-applicator, ersione lunga	302-004-70
	tomas®-wheel	302-004-30
	tomas®-torque ratchet Pulirlo e disinfettarlo completamente smontato. Sterilizzarlo rimontato	302-004-40
	tomas®-driver	302-004-50
	tomas®-driver, lungo	302-004-60
	tomas®-handpiece (avvitatore manuale)	302-004-80
	tomas®-stop screw	302-013-01
	tomas®-tool tray	302-155-00
	tomas®-tool tray	302-156-00
	Cacciavite a brugola per tomas®-stop screw e apparecchi per distalizzazione	607-129-00
	Cacciavite a brugola per Herbst® TS, I, II e SUS²	607-144-00

Frese	REF
 tomas®-round drill 1.0 (fresa a rosetta)	302-003-00
 tomas®-drill SD 1.1, short pilot drill (fresa pilota)	302-103-00
 Fresa in tungsteno, grossa	123-603-00 123-603-30
 Fresa in tungsteno, fine	123-604-00 123-604-30
 Gommino per debonding, coppetta	V-BR3
 Gommino per debonding, disco	V-BR6
 Gommino per debonding, fiamma grossa	V-BR7
 Gommino per debonding, fiamma piccola	V-BR11

Bibliografia

Ulteriori consigli per il trattamento di pinze e strumenti nello studio dentistico e nel laboratorio odontotecnico sono disponibili in „Arbeitskreis Instrumenten-Aufbereitung“ nel suo „opuscolo giallo“ (solo in lingua tedesca ed inglese).

www.a-k-i.org

Il Gruppo Dentauro

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

- ➔ Per ulteriori informazioni su prodotti e servizi, visitare il sito www.dentaurum.com
- ➔ Ricordiamo anche il nostro ampio programma corsi. Per informazioni: 051 861935

Assistenza Clienti Ortodonzia: telefono 051 862580 - E-Mail: ortodonzia@dentaurum.it - fax: 051 863291

Ufficio commerciale: telefono 051 862580 - ordini@dentaurum.it - fax: 051 863291

Data dell'informazione: 03/17

Soggetto a variazione



www.dentaurum.com



Like us on Facebook!



YouTube

Visit us on YouTube!



Follow us on Pinterest!

D
DENTAURUM
ITALIA

Dentauro Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Funo (BO)
Telefono 051 862580 | Fax 051 863291 | www.dentaurum.it | info@dentaurum.it