

In funzione delle diverse qualità di osso

Da adattare in funzione delle indicazioni e della personale situazione presentata dal paziente.

 Utilizzo facoltativo, considerando la corrispondente qualità di osso.

		Osso morbido					Osso medio					Osso duro				
		ø 3.3	ø 3.7	ø 4.2	ø 4.8	ø 5.5	ø 3.3	ø 3.7	ø 4.2	ø 4.8	ø 5.5	ø 3.3	ø 3.7	ø 4.2	ø 4.8	ø 5.5
Marcatore		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fresa pilota ¹		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Surface cutter ³		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prima fresa ø 3.3 ¹		X		X			X		X			X		X		
Prima fresa ø 3.7 ¹			X		X	X		X		X	X		X		X	X
Prima fresa ø 4.2 ¹				X					X					X		
Prima fresa ø 4.8 ¹					X	X			X	X				X	X	
Prima fresa ø 5.5 ¹						X				X					X	
Seconda fresa ø 3.3 ¹		almeno 7 mm					X					X				
Seconda fresa ø 3.7 ¹			almeno 7 mm					X					X			
Seconda fresa ø 4.2 ¹				almeno 7 mm					X					X		
Seconda fresa ø 4.8 ¹					almeno 7 mm					X				X		
Seconda fresa ø 5.5 ¹						almeno 7 mm					X				X	
Machiatore ADVANCED ^{1, 2, 3}		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

¹ La profondità d'inserzione della fresa pilota, della fresa 1 e del maschiatore dipende dalla lunghezza dell'impianto. La profondità d'inserzione della fresa 2 dipende dalla stabilità primaria che si intende ottenere. La profondità d'inserzione massima della fresa 2 dipende dalla lunghezza dell'impianto relativo. I maschiatori devono essere usati se si desidera che il torque degli impianti sia superiore a 45 Ncm. Osservare la relativa scala di profondità.

² Per l'inserzione degli impianti tioLogic®, si prega di utilizzare i maschiatori STANDARD.

³ Le frese raffigurate nell'esempio in tabella sono quelle di ø 4.2 mm (anello rosso)

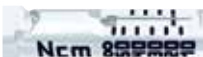
Chiave dinamometrica

Tabella – Torque dell'impianto*

La chiave dinamometrica ha un uso esclusivamente clinico.

In laboratorio le viti protesiche vengono strette direttamente a mano dall'odontotecnico.



Impianto		(in funzione della densità ossea) max. 45 Ncm	
Tappi di chiusura impianti		15 Ncm, o manuale	
Vite di chiusura abutment per barre		15 Ncm, o manuale	
Vite di chiusura abutment per ponti		15 Ncm, o manuale	
Vite di chiusura abutment AngleFix		15 Ncm, o manuale	
Viti di guarigione		15 Ncm, o manuale	
Viti per transfer d'impronta		15 Ncm, o manuale	
Vite per abutment provvisorio		15 Ncm, o dosato manualmente	
Vite AnoTite L 9.0 mm		30 Ncm	

Abutment per barra		35 Ncm	
Abutment per ponte		35 Ncm	
Abutment AngleFix 0° GH 1.0 mm		35 Ncm	
Vite AnoTite per barra/ponte/ Anglefix L 6.0 mm		25 Ncm	
Abutment a sfera		35 Ncm	
Abutment LOCATOR®		30 Ncm	

* con stabilità primaria e osteointegrazione