



CITO mini®

Sottile. Rapido. Semplice.

D
DENTAURUM
1886

Dentaurum.
Oltre 135 anni di competenza dentale.



*La qualità è una
vostra richiesta e la
nostra competenza.*



Le tecnologie dentali
fissano gli standard.

Le aziende del Gruppo Dentaurum sviluppano, fabbricano e commercializzano in tutto il mondo prodotti per dentisti e odontotecnici. La scelta di articoli per protesi, ortodonzia e implantologia è unica nel panorama dentale. La Dentaurum, produttrice degli impianti, è una delle filiali Dentaurum.

La qualità genera fiducia.

Essendo una delle più antiche società indipendenti esistenti nel dentale, Dentaurum ha potuto acquisire nel tempo un'esperienza globale in campo odontoiatrico. Il successo ottenuto in tutti questi anni è il frutto del consenso conseguito dai propri clienti nonché la conseguenza di una politica che ha sempre messo al centro le esigenze del mercato. Sulla base di questi presupposti Dentaurum si pone sempre nuovi obiettivi, proponendosi con progetti innovativi sia in termini di qualità del prodotto che di tecnologie per la sua realizzazione.

Il servizio come valore aggiunto.

Nello studio e nel laboratorio è possibile utilizzare molti prodotti Dentaurum di qualità. La filosofia aziendale prevede, anche, l'offerta di svariati servizi accessori, fra i quali ricordiamo l'assistenza tecnica e l'attività formativa di supporto concretizzata con corsi professionali.



Il sistema implantare CITO mini®.



Collo gengivale lucido.

Ottimale supporto per i tessuti molli.

Filettatura crestale fine.

Sperimentato condizionamento superficiale.

Geometria delle spire ottimizzata al FEM¹.

Spire autofilettanti.

¹ I. Hasan, C. Bourauiel:
Biomechanische Untersuchungen des Einflusses
von Geometrievarianten des CITO mini® Implantats
(Studi biomeccanici sull'influenza di differenti geometrie
dell'impianto CITO mini®); Università di Bonn 2014.

CITO mini®

CITO mini®


La soluzione per pazienti e clinici.

La ventennale esperienza maturata nel campo dell'implantologia orale ha permesso a Dentaforum di creare la nuova famiglia di impianti CITO mini®.

Questi impianti di piccolo diametro sono stati progettati in particolare per i pazienti con **ridotta disponibilità ossea** permettendo, anche in questi casi, di beneficiare dei vantaggi di una protesi totale o parziale a supporto implantare. Poiché la gran parte di queste situazioni può essere trattata con **carichi immediati**, i pazienti potranno subito riacquisire il perduto sorriso.


La possibilità di **inserimento transgengivale**, la **procedura poco invasiva** e l'opportunità, nella maggior parte dei casi, di **evitare interventi rigenerativi**, rende il trattamento con gli impianti CITO mini® molto gradito al paziente, sia per l'aspetto **economico** che per quello **psicologico** (minore stress alla poltrona).

Il clinico dispone di un ben organizzato **kit di strumenti, semplice e completo**, che permette l'inserimento dell'impianto in 3 semplici passaggi. Questa **efficace procedura** è supportata da un nuovo concetto di confezionamento, che assicura la maggiore efficienza di lavoro. Con CITO mini®, l'implantologo potrà liberamente decidere quali passaggi protesici dovranno essere eseguiti alla poltrona e quali in laboratorio.

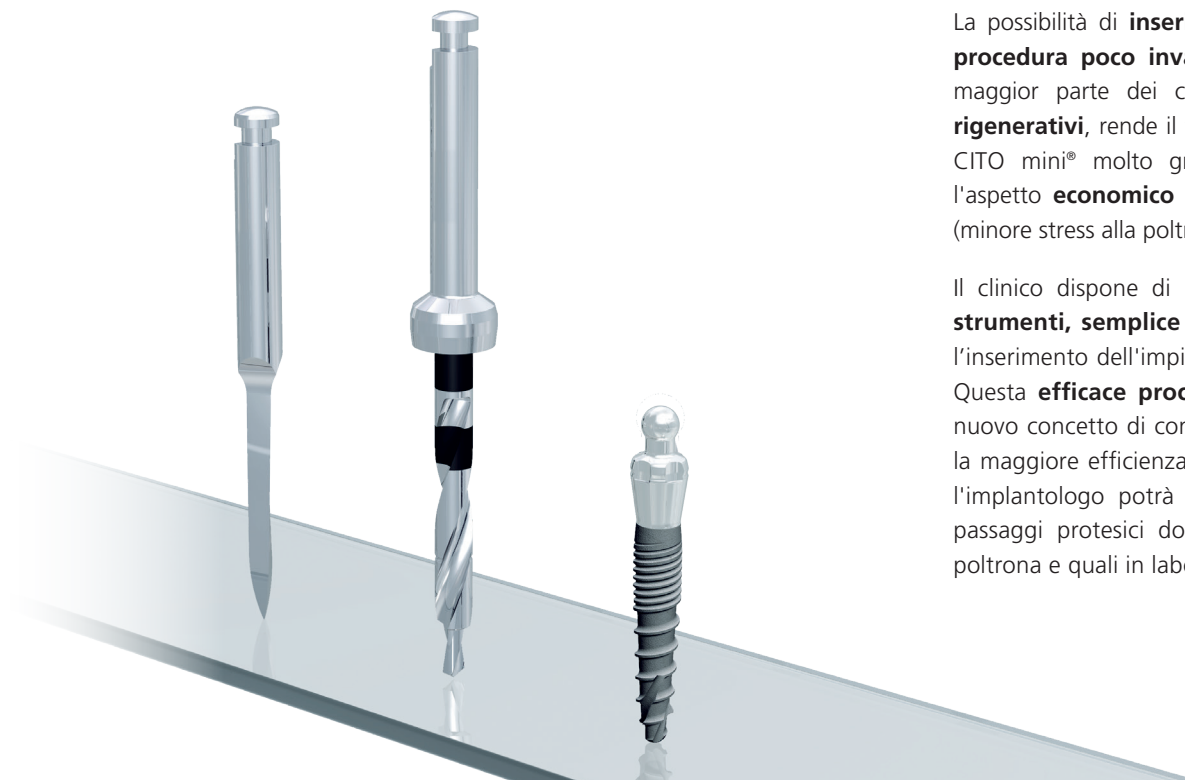

L'impianto CITO mini®.

Forma dell'impianto e geometria delle spire ottimizzate al FEM per una distribuzione ideale del carico¹.

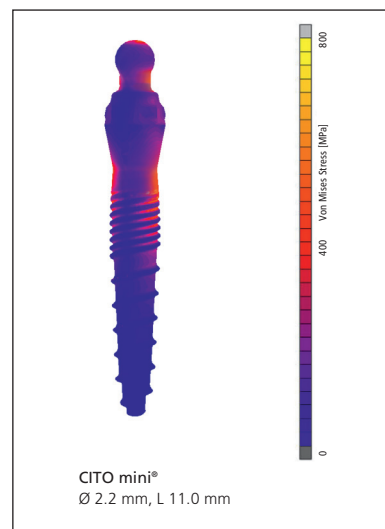

L'impianto CITO mini®.

La forma dell'impianto CITO mini® e la geometria delle sue spire sono state calcolate utilizzando l'analisi FEM¹. Tali test hanno dimostrato un carico leggero e uniforme, evitando stress e picchi di sollecitazione locale dannosi per l'osso circostante.

Gli impianti CITO mini® presentano una macro struttura cilindro-conica. Il collo gengivale lucido fornisce un profilo d'emergenza ottimale per i tessuti molli.

Le spire autofilettanti dei CITO mini® consentono, in combinazione con il loro passo, il rapido e atraumatico inserimento dell'impianto con un torque costante, garantendo un'elevata stabilità primaria. La regione endossea dell'impianto CITO mini® presenta una superficie sabbiata e mordenzata.

¹ I. Hasan, C. Bourauel:
Biomechanische Untersuchungen des Einflusses von Geometrievarianten des CITO mini® Implantats
(Studi biomeccanici sull'influenza di differenti geometrie dell'impianto CITO mini®); Università di Bonn 2014.

3 passaggi per il successo.

Tray chirurgico for CITO mini®.

Il tray chirurgico for CITO mini® garantisce la massima flessibilità durante la preparazione del sito implantare, riducendo al minimo il numero di strumenti da usare in successione. Il protocollo clinico dello strumentario CITO mini® consente, quindi, una preparazione atraumatica e minimamente invasiva, eseguita sulla base della qualità ossea e regolando individualmente la profondità di penetrazione. Il fine è quello di raggiungere la massima stabilità primaria utilizzando una sola fresa.





Non tutti i componenti mostrati sono inclusi nel tray al momento della consegna.

Protocollo di preparazione.

Protocollo di preparazione con lo strumentario CITO mini® in funzione delle diverse qualità dell'osso.

Da adattare in funzione delle indicazioni e dell'iniziale situazione presentata dal paziente. L'inserzione degli impianti CITO mini® in osso morbido non è indicata.

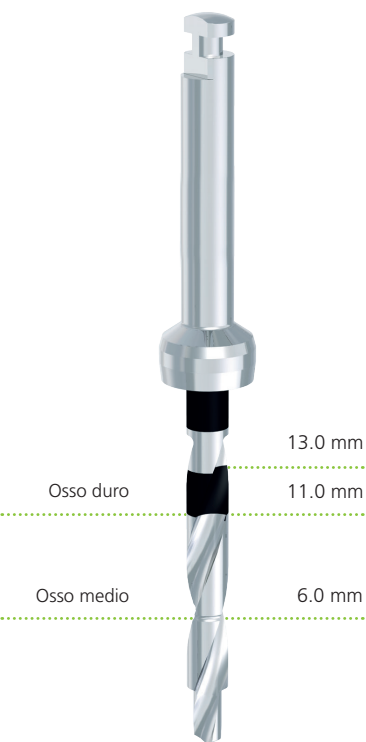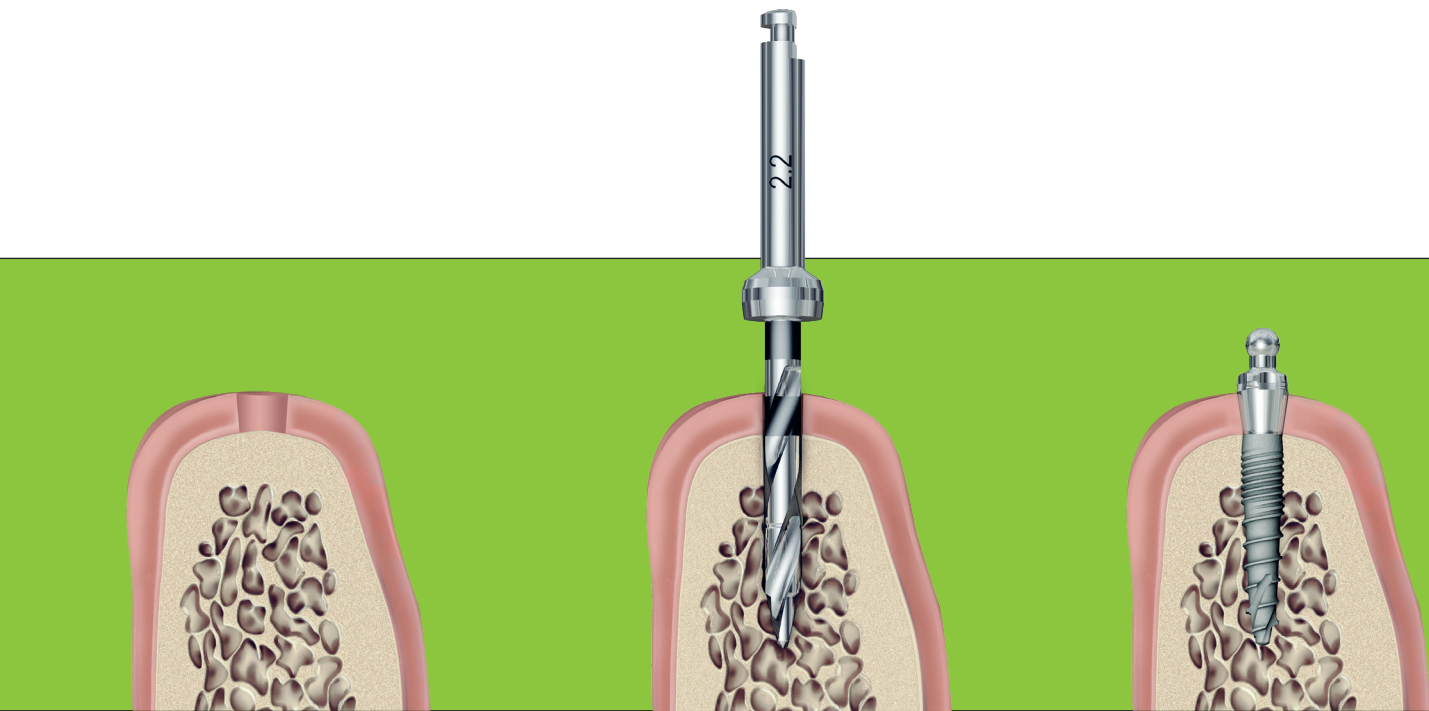

		Osso morbido			Osso medio			Osso duro		
										
		ø 1.8	ø 2.2	ø 2.5	ø 1.8	ø 2.2	ø 2.5	ø 1.8	ø 2.2	ø 2.5
Fresa per marcare ²					X	X	X	X	X	X
Fresa pilota per ø 1.8 mm ¹		L'inserzione degli impianti CITO mini® in osso morbido non è indicata.			almeno 6.0 mm			X		
Fresa pilota per ø 2.2 mm ¹						almeno 6.0 mm			X	
Fresa pilota per ø 2.5 mm ¹							almeno 6.0 mm			X

¹ La profondità d'inserzione / lunghezza della fresa pilota va regolata in base alla stabilità primaria che si intende ottenere in funzione della qualità dell'osso. Le marcature di profondità presenti sulle frese pilota risultano utili per evitare di ledere le strutture adiacenti (ad es. nervo) con perforazioni troppo profonde.

² Utilizzo ottimale.

Panoramica prodotti.

Componenti del sistema
implantare CITO mini®.



Tray chirurgico

REF 307-000-00



Tray chirurgico for CITO mini®

- Contenuto:
- fresa per marcare
 - fresa pilota per ø 1.8 mm
 - fresa pilota per ø 2.2 mm
 - fresa pilota per ø 2.5 mm
 - chiave di avvitamento PentaGrip (mandrino ISO)

Frese

REF 382-015-00



Fresa per marcare ø 1.5 mm

REF 302-118-00



Fresa pilota per ø 1.8 mm ø 1.5 mm L 17.0 mm

REF 302-122-00



Fresa pilota per ø 2.2 mm ø 1.9 mm L 17.0 mm

REF 302-125-00



Fresa pilota per ø 2.5 mm ø 2.1 mm L 17.0 mm

Impianti

REF 303-018-11



Impianto CITO mini® ø 1.8 mm L 11.0 mm

REF 303-018-13



Impianto CITO mini® ø 1.8 mm L 13.0 mm

REF 303-022-11



Impianto CITO mini® ø 2.2 mm L 11.0 mm

REF 303-022-13



Impianto CITO mini® ø 2.2 mm L 13.0 mm

REF 303-025-11



Impianto CITO mini® ø 2.5 mm L 11.0 mm

REF 303-025-13



Impianto CITO mini® ø 2.5 mm L 13.0 mm

Elementi protesici

REF 306-614-00



Analogo CITO mini®

REF 306-616-00



Matrice O-Ring 1 CITO mini®

REF 306-618-00



Matrice O-Ring 2 CITO mini®

REF 306-620-00



Matrice O-Ring 3 CITO mini®

REF 306-626-00



O-Ring per matrice 1 CITO mini®, 1 pezzo

REF 306-627-00



O-Ring per matrice 1 CITO mini®, 10 pezzi

REF 306-628-00



O-Ring per matrice 2 + 3 CITO mini®, 1 pezzo

REF 306-629-00



O-Ring per matrice 2 + 3 CITO mini®, 10 pezzi

REF 306-632-00



Distanziatore

Accessori

REF 387-511-00



Adattatore – mandrino ISO Hexagon/cricchetto

REF 307-646-00



Chiave di avvitamento PentaGrip – mandrino ISO


REF 387-800-00



Chiave dinamometrica con funzione di blocco

Modelli dimostrativi

REF 308-420-00

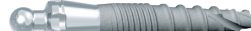

Impianto CITO mini® demo 5:1

CONTATTA
DENTAURUM ITALIA

SERVIZIO CLIENTI	051 862580 - <i>Centralino</i>
Ordini	- 224
Commerciale	- 226
Implantologia	- 335 1379018

Dentaurum Italia S.p.a.



Via degli Speciali, 142/144
Centergross 40050 Funo (BO)



Telefono 051 862580



info@dentaurum.it
www.dentaurum.it



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.IT