



ceraMotion®

my first  
ceramic  
in paste



ceraMotion® Zr Pasta Glaze

Massa da glasure omogenea per  
ossido di zirconio e disilicato di litio.

**D**  
DENTAURUM

# Brillantezza omogenea in una cottura!

2 paste da glasure per una brillantezza omogenea in una sola cottura. Pronte all'uso, masse fluorescenti da glasure per zirconia e disilicato di litio:

ceraMotion® Zr Pasta Glaze trasparente, 3g | REF 250-271-03

ceraMotion® Zr Pasta Glaze bright, 3g | REF 250-272-03

## I vantaggi comuni:

- ✓ necessitano di una sola cottura
- ✓ paste pronte all'uso
- ✓ offrono una fluorescenza naturale
- ✓ presentano un'ottima bagnabilità delle superfici
- ✓ restituiscono un grado di lucentezza omogeneo



ceraMotion® Zr Pasta Glaze trasparente



ceraMotion® Zr Pasta Glaze bright



Le differenze.

*lucentezza di  
grado medio*

*lucentezza di  
grado superiore*



# La fluorescenza di una corona in zirconia....



...di un dente naturale.



Tutte le paste ceraMotion® One Touch  
sono fluorescenti e la loro

*fluorescenza*

è adattata a quella del dente naturale.

# ceraMotion® Zr Pasta Glaze.




*"ceraMotion® Zr Pasta Glaze  
e ceraMotion® One Touch:  
semplici, rapide ed estetiche"*

MDT Germano Rossi

Maggiori informazioni →



Brillantezza naturale con zirconia e disilicato di litio.

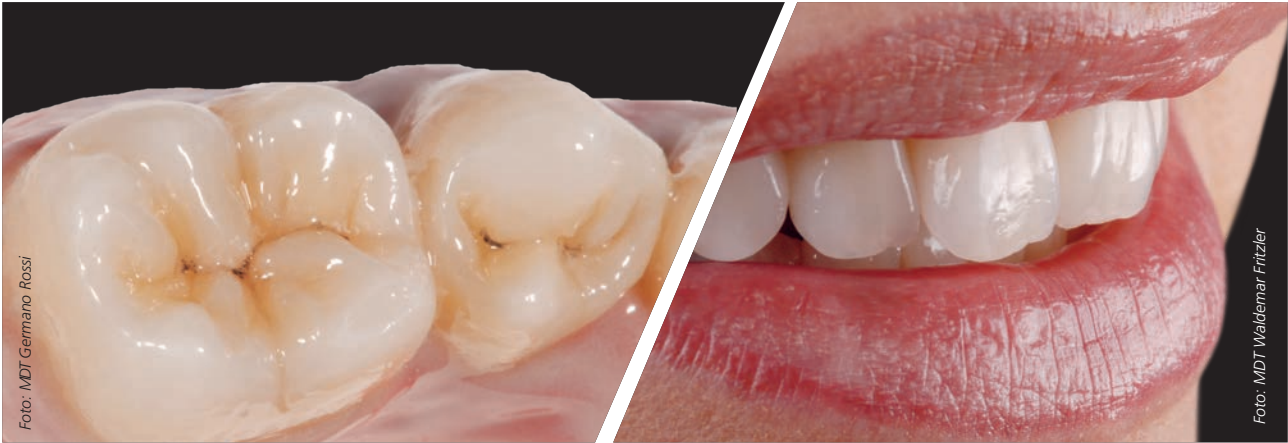

## Tabella di cottura.

	Temperatura iniziale (°C)	Asciugatura (m)	Salita (°C / min)	Inizio vuoto (°C)	Fine vuoto (°C)	Temperatura finale (°C)	Mantenimento (min)
Glasure	450	6	55	450	730	730	1 (senza vuoto)

**!** Le temperature di cottura specificate sono valori guida che possono variare a causa delle diverse prestazioni del forno.

# Il Gruppo Dentauro

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE

Assistenza tecnica: 334 6000838 | E-Mail: [ceramica@dentauro.it](mailto:ceramica@dentauro.it)  
Assistenza commerciale: 051 862580 | E-Mail: [ordini@dentauro.it](mailto:ordini@dentauro.it)

Data dell'informazione: 10/23  
Soggetto a variazione



[shop.dentauro.it](http://shop.dentauro.it)



Like us on Facebook!



Visit us on YouTube!



Follow us on Instagram!

**D**  
DENTAURUM  
ITALIA

Dentauro Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Funo (BO)  
Telefono 051 862580 | Fax 051 863291 | [www.dentauro.it](http://www.dentauro.it) | [info@dentauro.it](mailto:info@dentauro.it)